



# TEST SNAP FOAL IgG

## Test de niveles de inmunoglobulina en potros

### DIAGNÓSTICO

El test SNAP de IgG para Potros es un análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas para la **medición semi-cuantitativa de inmunoglobulina G (IgG) en suero, plasma o en sangre entera de equinos**.

Proporciona **resultados rápidos y precisos en minutos**, lo que le permite detectar niveles bajos de IgG e iniciar de inmediato un tratamiento que le puede salvar la vida al potro.

La detección rápida y precisa de los niveles de IgG en neonatos es crucial:

- Los niveles bajos de IgG pueden provocar infecciones bacterianas, artritis, neumonía y enteritis.
- Hasta el 25 % de los potros pueden tener niveles bajos de IgG.
- Los potros solo tienen 24 horas después del nacimiento para absorber las inmunoglobulinas del calostro.
- Los resultados tardíos requieren una costosa administración intravenosa de inmunoglobulinas.
- Si no se trata, los potros indefensos pueden morir.




### INSTRUCCIONES DE USO:


- Los reactivos y dispositivos del kit deben estar a una temperatura de 18-25°C cuando se vayan a usar.
- Puede usarse sangre entera, suero o plasma.
- La sangre entera debe ser anticoagulada con EDTA o heparina y puede ser usada fresca o previamente refrigerada de 2-8°C hasta una semana.
- El suero o plasma puede ser usado fresco, o guardado de 2-8°C hasta 7 días.
- Las muestras hemolizadas no afectarán los resultados. La EDTA o la heparina en las muestras de sangre entera y plasma no afectarán los resultados.

#### IMPORTANTE:

Leer atentamente las instrucciones del prospecto antes de usarlo. No presionar el activador hasta que se indique.

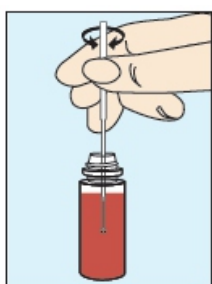

1. Diluir la muestra. Mezclar bien y desechar las primeras 5 a 10 gotas del frasco.

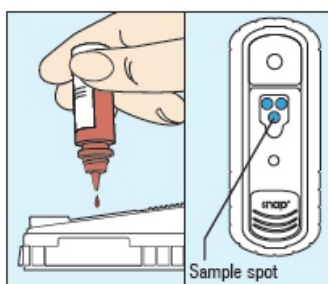

2. Aplicar 1 gota de muestra sobre el punto de la muestra (sample spot).



3. Verter toda la botella de conjugado en el pozo de muestra.




4. En cuanto aparezca color en el círculo de activación, presione firmemente hasta que se liberen las soluciones. Se oirá un "snap" distintivo.



5. Esperar 7 minutos y leer los resultados de forma visual.

### LECTURA DE RESULTADOS:

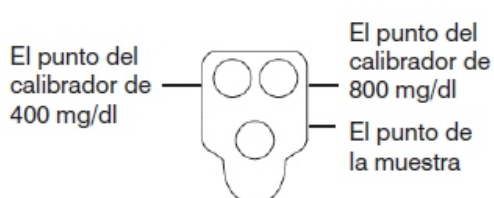


<400 mg/dl



~400 mg/dl



400-800 mg/dl

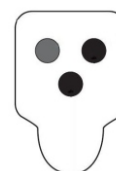

~800 mg/dl



<800 mg/dl